

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



COMMITTEE FOR STANDARDIZATION,
METROLOGY AND CERTIFICATION
UNDER CABINET COUNCIL
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENT

АНнулиРОВАН



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

1989

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

01 апреля 2007 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения НТК по метрологии (протокол № 04-2002 от 06 июня 2002 г.) утвержден тип

**измерители артериального давления общего применения
модернизированные ИАДМ-ОПМ,**

ЗАО "Медтехника", г. Петродворец, Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 25 0526 02** и допущен к применению в Республике Беларусь с 23 сентября 1997 года.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель Комитета



В.Н. Корешков
20 июня 2002 г.

Продлен до " " 20 г.

Председатель Комитета

В.Н. Корешков
" " 20 г.

НТК 104-02 от 06.06.02

Судяков С. В.

Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО



Зам. генерального директора
Госст. С. Петербург

А.И. Рагулин

1998 г.

Измеритель артериального давления мембранный общего применения модернизированный ИАДМ-ОПМ	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>9994-93</u> Взамен № _____
---	--

Выпускается по ТУ 25-2012.071-89, ГОСТ 6915-80.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измеритель артериального давления мембранный общего применения ИАДМ-ОПМ (в дальнейшем-прибор) предназначен для измерения систолического и диастолического артериального давления косвенным методом Короткова и применяется в медицинских лечебно-профилактических учреждениях и для индивидуального пользования.

ОПИСАНИЕ

Прибор состоит из мембранного манометра, компрессионной манжеты с соединительными трубками, пневматического нагнетателя и фонендоскопа.

Принцип измерения артериального давления прибором основан на прослушивании фонендоскопом тонов Короткова в режиме декомпрессии в дистальной части плечевой артерии, предварительно пережатой избыточным давлением компрессионной манжеты, и считывании этого давления на шкале мембранного манометра.

Прибор имеет следующие модификации: ИАДМ-ОПМ тА2.832.041, ИАДМ-ОПМ тА.832.035, ИАДМ-ОПМ2 тА2.832.046, ИАДМ-ОПММ АФИН.941323.001, отличающиеся конструктивными данными, не влияющими на точность измерения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений - от 26,7 до 400 гПа (от 20 до 300 мм рт.ст.).

Цена деления шкалы - 2,67 гПа.

Предел допускаемой основной погрешности на участке шкалы от 80 до 320 гПа (от 60 до 240 мм рт.ст.) - ± 4 гПа (± 3 мм рт.ст.), а в остальном диапазоне шкалы - $\pm 5,33$ гПа (± 4 мм рт.ст.).

Средний срок службы без учета пневмокамер манжет не менее 6 лет.

Габаритные размеры прибора в футляре - 225×130×80 мм.

Масса не более 0,85 кг.



Копия
Ген. директор
ЗАО "Медтехника"
И.И. Рагулин

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта прибора печатным способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки прибора входят: манометр, нагнетатель пневматический, манжета (или набор манжет), соединительные трубки, фонендоскоп, футляр, паспорт, методика поверки.

Методика поверки поставляется по требованию потребителя.

ПОВЕРКА

При проведении поверки приборов используется инструкция № 7-63.

Основное поверочное оборудование для поверки прибора - автоматический задатчик давления АЗД-04.

Межповерочный интервал - один год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 25-2012.071-89, ГОСТ 6915-80.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измеритель артериального давления мембранный общего применения модернизированный ИАДМ-ОПМ соответствует техническим условиям ТУ 25-2012.071-89.

Изготовитель - АО "Саранский приборостроительный завод"

ЗАО "Медтехника": 198303, г. Петродворец, ул. Фабричная, 1.

ТОО "Медад": г. С.-Петербург, С.-Петербургский пр., 60.


ТОО "Тривес": 197061, г. С.-Петербург, а/я 1040.

ЗАО "Фаворит-Плюс": 198903, г. Петродворец, ул. Фабричная, 1.

АО "Красногвардеец": 197376, г. С.-Петербург, Инструментальная ул. 3.

АОЗТ "Декор": 196191, г. С.-Петербург, Варшавская ул., д.37/1.

Генеральный директор
АОЗТ "Декор"

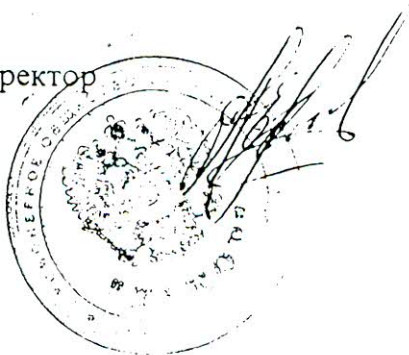

А.Е. Елин