

**АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ
ПОЛОСТИ РТА ГР-2**


Внесены
в Государственный
реестр
под № 5530—76

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 14 июля 1976 г. Выпуск разрешен

до 01.07.1984 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аппараты ГР-2 (см. рисунок) предназначены для проведения гальванических процедур в полости рта в условиях стоматологических поликлиник.

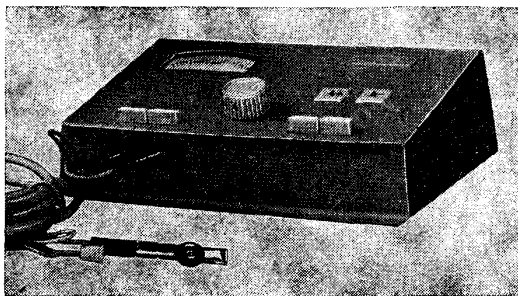

ОПИСАНИЕ

Прибор представляет собой делитель напряжения, выполненный на переменном резисторе, включенный в электрическую сеть переменного тока через разделительный трансформатор, выпрямитель и фильтр.

Выходная цепь делителя напряжения имеет миллиамперметр для контроля тока в цепи пациента.

Аппарат смонтирован в металлическом корпусе.

На лицевой панели расположены: миллиамперметр, клавиша включения сети, клавиша переключения полярности в цепи пациента, рукоятка переменного резистора и сигнальные лампы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходной ток при нагрузке 5 кОм от 0 до 5 ± 1 мА.

Приведенная погрешность измерения выходного тока не более 5%.

Коэффициент пульсации в цепи пациента не более 0,5%.

Питание от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Потребляемая мощность 15 В·А.

Габаритные размеры $244 \times 164 \times 85$ мм.

Масса 2,5 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с аппаратом поставляют:

- 1) электроды для гальванизации корневых каналов — 10 шт.;
- 2) электроды для гальванизации слизистой — 6 шт.;
- 3) электроды для гальванизации десен — 9 шт.;
- 4) провод электродов;
- 5) переходник;
- 6) бинт резиновый;
- 7) запасные части:
 - а) лампу миниатюрную сигнальную;
 - б) предохранители — 2 шт.;
 - в) проволоку посеребренную;
- 8) паспорт.

ПОВЕРКА

Методика поверки аппарата ГР-2 изложена в паспорте, входящем в комплект поставки.

Испытания проводила Волгоградская межобластная лаборатория государственного надзора за стандартами и измерительной техникой. Результаты испытаний рассматривали ВНИИФТРИ и ВНИИМС.

Изготовитель — Министерство медицинской промышленности СССР.